

1. Allgemeine Hinweise

Die Zweckbestimmung von OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720) besteht darin, die Unterstützung und Ausrichtung des Körpers von Patienten und Bewohnern während medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Behandlungen zu fördern, um Druckstellen, Schmerzen und Verletzungen zu vermeiden, je nach den individuellen Bedürfnissen und Gesundheitszuständen.

Das/die Produkt/Produktgruppe darf nur entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung verwendet werden. OBA AG übernimmt keine Haftung für den Gebrauch des Produktes außerhalb der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort auf. Sollten Sie die Produkte an einen neuen Eigentümer weiterverkaufen, muss diese Gebrauchsanweisung weitergegeben werden. Schließlich sind die im jeweiligen Anwendungsland gültigen regulatorischen Anforderungen an dieses Produkt zu berücksichtigen.



Der Einsatz der Positionierungshilfen muss von geschultem Fachpersonal eingeschätzt, instruiert, angewendet und überwacht werden, um die individuellen und medizinischen Bedürfnisse und Gesundheitszustände der Patienten zu gewährleisten.

2. Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor jeder Anwendung die Unversehrtheit des Produktes. Bei Beschädigungen ist die Funktion des Produktes und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (zum Beispiel Heizkörper, Herdplatte, offene Flamme, Funkenflug) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie den Nutzungsbereich frei von scharfen und spitzen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgesehene Zubehör.
- Die OBA Positionierungshilfen müssen vor jedem Patienten- oder Bewohnerwechsel gemäß den unter Punkt 5 aufgelisteten Hinweisen hygienisch korrekt aufbereitet und dürfen nur in einem einwandfreien hygienischen Zustand bei Patienten und Bewohner verwendet werden.

3. Produktinformationen

Technische Daten und Produktbeschreibungen

[Webseiten Link OBA: Gebrauchsanweisung](#)

[Webseiten Link OBA: Produktinformationen](#)

Lieferumfang: OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720)
bestehend aus: OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720)
Gebrauchsanweisung

Allgemeine Produktbeschreibung:

OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720)

- Positionierungshilfen nach dem Weichlagerungs Prinzip bestehend aus
 - Füllung Produktabhängig:
 - Polymoove®-Granulat aus EPP (expandierfähiges Polypropylen)
 - Moovecare Mischung: Polymoove®-Granulat aus EPP (expandierfähiges Polypropylen) mit Polyester-Watte
 - Schaumstofffüllungen
 - synthetischem Inkontinenz Schutzbezug (PU-beschichtetes PES oder PA Trägergewebe)
- Wirkungsweise: Körperstellen mit Knochen Vorsätzen sind stark gefährdet (bspw. Sakrum, Ferse, Trochanter).
Durch Umpositionierung und/oder Freilagerung der betroffenen Risikostellen auf einer Unterlage (Matratze oder sonstiges) wird diese entlastet.
- Validierung: Messungen des veränderten Auflagedrucks nach der Neupositionierung
- Verwendete Substanzen
 - Füllmaterial: Schaumstoff aus Polyurethan, EPP-Granulat oder Mischung (EPP-Granulat / Polyester Watte)
 - Schutzbezug, Beschichtung Polyurethan, Trägergewebe: Polyamid, Polyester
 - kein Gewebe menschlichen oder tierischen Ursprungs, Arzneimittel, Radiopharmaka, Nanopartikel

Zubehör:

Die Kissen der OBA AG dürfen ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Zubehör verwendet werden (Baumwoll- und Inkontinezzschutzbezüge)

4. Bestimmungsgemäße Anwendung:

Die OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720) wird/werden vorübergehend oder längerfristig als wirksames medizinisch-pflegerisches Hilfsmittel bei der Patientenlagerung (Art der Lagerung) im Ambulanten, stationären, klinischen oder häuslichen Bereich eingesetzt.

Die Kissen können zur Umpositionierung, Entlastung, Freilagerung und Komfortverbesserung angewendet werden. Die Körperwahrnehmung und das Wohlbefinden werden dabei positiv unterstützt. Die individuell einsetzbaren Positionierungshilfen können für die im pflegerischen Bereich üblichen Positionierungsarten eingesetzt werden.

Webseite OBA Produktinformation

[Webseiten Link OBA: Gebrauchsanweisung](#)

[Webseiten Link OBA: Produktinformationen](#)

Warnhinweise

-  Der Einsatz der Positionierungshilfen muss von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.
-  Die Vielfalt der OBA Positionierungshilfen ermöglicht viele weitere Einsatzmöglichkeiten, welche nicht alle vorgängig dargestellt werden können. In diesen Situationen ist eine Evaluation, Durchführung und Überwachung durch geschultes Fachpersonal zwingend notwendig.
-  **Ref. 3060 Jimmy darf nur unter Aufsicht verwendet werden!**
-  Die Kombination von verschiedenen OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720) ist möglich. Dabei ist darauf zu achten, dass die im Detail ausgewählte Kombination a) durch Pflegefachpersonen angeordnet wird und b) ist sicherzustellen, dass durch regelmäßige Beobachtung und Überprüfung der Pflegefachperson deren Wirkung überprüft wird. Sollte dadurch festgestellt werden, dass die gewählte Kombination der verschiedenen OBA-Positionierungshilfen **Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720)** nicht das gewünschte Resultat erzielt, müssen unverzüglich Korrekturmaßnahmen getroffen werden.
-  Die OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720), ersetzen nicht den regelmäßigen, manuellen Positionierungswechsel der behandelnden Person durch das Pflege- und Betreuungspersonal. Achten Sie auf Veränderungen der Haut. Fragen Sie bei Bedarf oder Unsicherheiten, Ihren Arzt oder Pflegefachkraft.

Indikationen:

Positionierungshilfen sind in verschiedenen medizinischen und pflegerischen Situationen von relevanter Bedeutung, um die Sicherheit, den Komfort und die Gesundheit von Patienten oder Pflegebedürftigen zu gewährleisten.

Mögliche Indikationen für den Einsatz von Positionierungshilfen sind z.B.:

- Indikation: (L89.0-2) Dekubitalgeschwür und Druckzone ([siehe Kapitel XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut \(L00-L99\)](#))
- **Mobilisierung und Rehabilitation:** Positionierungshilfen können verwendet werden, um Patienten bei der Mobilität und Rehabilitation zu unterstützen, insbesondere nach Verletzungen, Operationen oder bei neurologischen Erkrankungen.
- **Pflege von Patienten mit orthopädischen Problemen:** Bei Patienten mit orthopädischen Erkrankungen oder Verletzungen können Positionierungshilfen verwendet werden, um Gelenke zu stabilisieren, Schmerzen zu lindern und die Genesung zu unterstützen.

Kontraindikationen:

Der Einsatz von Positionierungshilfen sollte sorgfältig abgewogen werden, da es auch Situationen gibt, in denen sie kontraindiziert sein können. Kontraindikationen können je nach Gesundheitszustand des Patienten variieren. Hier sind einige mögliche Kontraindikationen für den Einsatz von Positionierungshilfen:

- **Hautverletzungen:** Bei offenen Wunden, Hautinfektionen oder Hauterkrankungen, die die Hautintegrität beeinträchtigen, sollten Positionierungshilfen mit Vorsicht verwendet werden.
- **Kontraindikationen aufgrund medizinischer Geräte:** Bei Patienten, die medizinische Geräte wie Drainagen, Katheter oder Beatmungsgeräte verwenden, müssen Positionierungshilfen so platziert werden, dass sie die Funktion dieser Geräte nicht beeinträchtigen.
- **Kontraindikationen aufgrund von Immobilität:** Bei Patienten, die immobilisiert sind oder eine eingeschränkte Mobilität aufweisen, müssen Positionierungshilfen sorgfältig ausgewählt und platziert werden, um das Risiko von Gelenksteifheit, Kontrakturen oder anderen Komplikationen zu minimieren.
- **Schmerzen:** Wenn der Einsatz von Positionierungshilfen Schmerzen verursacht oder verstärkt, sollten alternative Methoden zur Schmerzlinderung oder -kontrolle in Betracht gezogen werden.
- **Unzureichende Anleitung oder Überwachung:** Der Einsatz von Positionierungshilfen erfordert oft spezielle Schulungen und Anweisungen. Wenn das Pflegepersonal nicht ausreichend geschult ist oder nicht in der Lage ist, die Positionierungshilfen angemessen zu überwachen, kann dies zu Problemen führen.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Positionierungshilfen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt, instruiert, angewendet und überwacht werden, um die individuellen und medizinischen Bedürfnisse und Gesundheitszustände der Patienten zu gewährleisten.

5. Vorgehensweise

1. Prüfen Sie die Verpackung und das Produkt bei Anlieferung auf eventuelle Beschädigungen
2. Entnehmen Sie die OBA Positionierungshilfe aus der Verpackung
3. Verwenden Sie das Kissen gem. der Bestimmungsgemäßen Anwendung - siehe Punkt 3



Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt

6. Pflege und Hygiene

Die OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720) ist/sind für den wiederholten Einsatz geeignet. Im Allgemeinen sind die jeweils gültigen nationalen regulatorischen Anforderungen zur hygienischen Aufbereitung zu beachten und eine fehlerfreie Funktion sicherzustellen. Das Produkt kann oberflächlich desinfiziert werden und bei bis zu 60° C in der Waschmaschine gewaschen werden - Bitte verwenden Sie ein textiles Wäschenetz. Mit tiefer Temperatur im Trockner trocken. Bei den OBA Positionierungshilfen handelt es sich nicht um sterile Produkte.



Desinfektionsmaßnahmen sind ausschließlich mit geeigneten und auf Wirksamkeit geprüften Desinfektionsmittel durchzuführen, gemäss separatem Pflegehinweis Dokument der OBA AG

-  Desinfektionsmittel, die Materialien der OBA Positionierungshilfen schädigen könnten, sind zu vermeiden.
-  Die Anwendungshinweise des Desinfektionsmittel Herstellers sind zu beachten.
-  Die OBA Positionierungshilfen müssen vor jedem Patienten- oder Bewohnerwechsel gemäß den unter Punkt 5 aufgelisteten Hinweisen hygienisch korrekt aufbereitet werden und dürfen nur in einem einwandfreien hygienischen Zustand bei Patienten und Bewohner verwendet werden.
-  Bei der Verwendung ungeeigneter bzw. nicht auf Wirksamkeit geprüfte Präparate oder deren falsche Anwendung, erlischt der Gewährleistungs- und Garantieanspruch.

7. Entsorgung und Umwelt

Entsorgung OBA Positionierungshilfen

OBA Positionierungshilfen können über den Hausmüll entsorgt werden (Restmüll). Vorzugsweise sind sie der zuständigen offiziellen Müllverbrennung zuzuführen. Die jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien sind zu beachten.

Infektiöse OBA Positionierungshilfen müssen gesondert entsorgt werden.

Entsorgung Verpackung

Es werden keine besonderen Verpackungsarten verwendet. Die jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien sind zu beachten.

8. Gewährleistung/Garantie

OBA AG übernimmt eine Gewährleistung für die OBA Positionierungshilfen, welche auf Grund von Fabrikationsfehler und/oder Materialfehler innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist. Sollte eine Prüfung durch die OBA AG ergeben, dass Gewährleistungsansprüche geltend gemacht wurden, die einen der folgenden Ausschlussgründe betreffen, ist OBA AG berechtigt, entstandene Aufwendungen (z. B. Prüf, und Transportkosten) an den Anspruchsteller weiterzugeben.

OBA AG übernimmt keine Gewährleistung:

- für Defekte, die auf unsachgemäße Behandlung und/oder Missachtung der Zweckbestimmung und den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungs bez. Verhaltensregeln zurückzuführen sind.
- für Beschädigungen und Störungen, die durch natürliche Abnutzung oder beim Transport entstehen.
- für gelieferte Ware, die ohne Zustimmung der OBA AG bearbeitet, behandelt oder verändert wurde
- bei Missachtung der Gebrauchsanweisung

-  Betreiber der vorliegenden Produkte müssen die am Anwendungsort jeweils gültigen regulatorischen Anforderungen für Medizinprodukte beachten.

9. Herstellerangaben

OBA AG Auf dem Wolf 20 4052 Basel Schweiz

10. Regulatorische Anforderungen:

Die OBA-Positionierungshilfen Polymoove (Ref 3700) Moovecare (Ref 3710) Schaumstoff (Ref 3720) der OBA AG erfüllen folgende regulatorische Anforderungen:

- (EU) 2017/745 Verordnung über Medizinprodukte
- SR 812.213 Medizinprodukteverordnung MepV



Alle im Zusammenhang mit den Produkten aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind unverzüglich dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.

Abkürzungen und Symbole

	Hersteller		Achtung, es folgt ein Warnhinweis
	Herstellungsdatum		maximale Waschtemperatur
	Hinweis auf Informationen in bzw. Ort der Gebrauchsanweisung		nicht bleichen
	Sicherheitshinweis: Die Gebrauchsanweisung <u>muss</u> beachtet werden		Wäschetrockner kann benutzt werden. Maximale Ausgangstemperatur
	Eindeutiger Indikator eines Medizinproduktes		Nicht chemisch reinigen
	CE-Kennzeichen, bestätigt die Konformität mit relevanten Normen		nicht bügeln
	Medizinprodukt		überprüfen
	Seriennummer		Zeigt den EU-Bevollmächtigten für die EU an
	Lotnummer		Importeur